

Mot de la Présidente de Mode Grand Ouest, Madame Sylvie CHAILLOUX, 21 avril 2020

*Dans le contexte de crise sanitaire COVID-19 et du classement en état d'urgence adopté par le gouvernement, **Une trentaine d'entrepreneurs** a aujourd'hui répondu présent en réunissant 300 salariés volontaires dans leurs entreprises, pour apporter une solution aux besoins importants de masques de protection. Les gestes barrières y sont appliqués. Chaque masque est intégralement fabriqué par un(e) seul(e) couturière(e). La démarche se veut citoyenne et sans marge bénéficiaire.*

DESCRIPTION

Il existe plusieurs catégories de masques. Chaque catégorie correspond à un usage.

Le Masque « PASCAL-BEC » produit par les ateliers de MODE GRAND OUEST entre dans la catégorie des « **masques alternatifs** » en complément des gestes barrières. Il est destiné à diminuer le facteur de risque de transmission de l'agent infectieux COVID 19.

Il est destiné aux personnes en situation de travail y compris les personnes en contact avec le public

Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact avec des patients.

Ce dispositif n'est NI un dispositif médical au sens du règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux) NI un équipement de protection individuelle au sens du règlement UE/2016/425 (masques filtrants FFP2).

UTILISATION

Un masque alternatif est un complément aux gestes barrières qui demeurent les mesures préalables à appliquer et à respecter strictement. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes.

- Ce masque doit être ajusté étroitement sur le nez, la bouche et le menton de la personne qui le porte pour assurer une étanchéité suffisante vis à vis de l'atmosphère ambiante au niveau du porteur.
- Il vise à retenir la projection naturelle de ses propres postillons en parlant ou toussant vers l'extérieur et à empêcher la réception de postillons d'une autre personne en face à face.

Toute mise à disposition de l'équipement est sous l'autorité et la responsabilité du remetteur de l'équipement, particulièrement dans le cadre d'une situation de travail. **Il appartient à l'employeur d'informer l'utilisateur du niveau de protection du produit comme complémentaire des mesures de base de protection.**

La remise de cette notice préalablement à la remise des masques à chaque utilisateur est indispensable

USAGE : **UNIQUE (non lavable)**

Durée d'utilisation : **4 heures en continu**

Attention : si le masque est retiré, il doit être changé et jeté. Ne pas le réutiliser.

DESIGNATION

- Masque barrière : matériau filtrant non tissé bicouche 100 % polyester – Fabrication Française
- A stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière
- Type de produit : « Masque réservé à des usages non sanitaires de catégorie UNS1 selon la note d'information interministérielle du 29 mars 2020 »
- Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (RP/20-2760/DGA MNRBC/2000305/NP Version 1) - efficacité de filtration des particules de 3 µm > 90 % - perméabilité à l'air pour une dépression de 100 Pa > 96 L.m-2.s
- Design établi et testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins
<https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection>

MISE EN PLACE DU MASQUE

Conditionnement : par 100 (10 paquets de 10)

Distribution individuelle : saisir chaque lot de 10 par les liens et ne pas toucher la partie centrale des masques pour les protéger de toute contamination avant emploi.

Les conditions d'utilisation et le port du masque sont aussi importants que le masque lui-même.

Un masque est **EFFICACE** si on respecte les précautions suivantes :

- Se laver les mains avec de l'eau et du savon pendant au moins 30 secondes ou avec une solution hydroalcoolique,
- Installer soi-même son masque sur le visage, ouvrir le masque, le placer sur le menton, passer le jeu de brides derrière la tête – le lien élastique le plus court se place sur la nuque.
- Les bords du masque doivent suivre le contour du visage et ne pas bailler, respirer plusieurs fois pour vérifier l'étanchéité du masque
- Ne plus toucher le masque et surtout ne pas le mettre autour de son cou puis le remettre.



Saisir le masque par les coutures
En le plaçant sur le menton



passer les 2 élastiques ensemble derrière la
tête – le plus court se place sur la nuque

Retirer le masque barrière :

- Se laver les mains
- Saisir le masque par les brides sans toucher la partie centrale
- Le jeter dans une poubelle munie d'un sac plastique
- Se laver les mains de nouveau
- Les sacs contenant des masques usagers ne se collectent pas dans les poubelles jaunes.

PRIX VENTE Conseillé HT 1.60 €

Distributeur : APHO – BP 21207 - 49312 CHOLET - contact@modegrandouest.fr – 02 41 75 29 29