



Groupe Atlas

Masque Barrière Catégorie 1

Lavez le masque avant la 1ère utilisation
(voir mode de lavage ci-dessous)



Mode utilisation Ref GA 2157

- 1 - Avant de mettre le masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique;
- 2 - appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur son visage; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte;
- 3 - lorsque l'on porte un masque : - éviter de le toucher - ne pas déplacer le masque.
- 4 - chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou solution hydro-alcoolique;
- 5 - si besoin de boire ou de manger, changer de masque;
- 6 - lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne pas réutiliser des masques à usage unique;
- 7 - pour retirer le masque :
 - prenez le masque par l'élastique ;
 - lavez le selon mode de lavage et d'entretien préconisés



Matériaux dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA
rapport IFTH N° 2020-04-21-009-1 et qui supportent 50 lavages

Efficacité de filtration des particules de 3 μm > 90% = 93,6

Perméabilité à l'air pour une dépression de 100 Pa > 96 L.m⁻².s-1 = 105



Groupe Atlas

ZA Les Petites Buttes
35600 BAINS SUR OUST

FRANCE - Tél. 02 99 70 50 05

<http://fabricant-masques.fr/>



Mode de lavage et d'entretien du masque

- 1 - Avant la 1ère utilisation et entre chaque utilisation, le masque doit être lavé en machine en utilisant un produit lessivel adapté au coton et poly-coton; Le cycle comprendra un plateau de 30 mn mini à 60°C avec
- 2 - Un séchage mécanique.
- 3 - Un repassage à une température de 120/130°C.
- 4 - Changer de masque toutes les 4 heures.
- 5 - Pour ne pas être contaminé lors du retrait du masque, il doit être correctement retiré et isolé, soit pour être jeté, soit pour être lavé.
- 6 - Stockage : masques non utilisés à stocker propres et secs, dans un emballage propre hermétique et à l'abri de la lumière.

En suivant ces consignes, vous pourrez porter les masques au delà de 50 lavages.

Une inspection visuelle doit être réalisée après chaque cycle de lavage. En cas de détection de dommage du masque barrière, jetez le.

Décompte d'utilisation des masques

Les masques peuvent être lavés 50 fois, chaque masque est donc utilisable 50 fois. Ce tableau vous aidera à suivre et gérer le décompte d'utilisation de vos masques, renseignez le en cochant les cases:

Utilisations									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

